

SANIT ErsteHilfe



SANIT

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0
Telefax: +49 7131 404360

E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de



Aus dem Sortiment:



Beschreibung

- Verband für die schnelle Behandlung jeder kleinen Verletzung
- Einfach und schnell in der Handhabung
- Perfekter Wundverschluss
- Kein Verkleben mit der Wunde
- Keine Bewegungseinschränkung
- Latexfrei
- Dauerelastisch
- Atmungsaktiv
- Rutschfest
- Wasserfest und abwaschbar
- Öl- und Fettfest
- 4,5 m je Rolle, Breite 2,5 cm

Anwendungsgebiete

- Arbeitsverletzungen bei der Montage oder im Alltag
- kleinere Schnittwunden
- Abschürfungen

Anwendung

Je nach Größe der Wunde den Anfang des selbsthaftenden Pflasters mehrfach falten, um ein Wundkissen zu bilden. Legen Sie das Wundkissen auf die Wunde und umwickeln Sie dieses mit dem flexiblen Pflaster. Das Pflaster abreißen und das Ende auf dem so angelegten Wundverband andrücken. Der Verband hält dadurch von selbst. Weitere Informationen finden Sie in unserer Gebrauchsinformation zu dem Produkt **SANIT ErsteHilfe**.



Mindesthaltbarkeit

- keine Angabe



Beispielbild

Lieferformen

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
1 / 10	2 Rollen je 4,5m	3218
1 / 1	Karton je 7 Dosen	3218DK

Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf unserer Homepage.